

flow.sil - Mikropaltversiegelung



Kein Platz für Bakterien!

flow.sil schützt Kavitäten passiv und aktiv vor Bakterien

Passiv

Die dünnfließende Konsistenz von flow.sil ermöglicht die gleichmäßige Verteilung in die sonst unzugänglichsten Kavitäten und dichtet damit perfekt jeden Hohlraum ab. Die Silikonmatrix von flow.sil ohne Weichmacher sorgt für eine zuverlässige Versiegelung durch eine gleichmäßige Verteilung und verhindert somit die Ansiedlung von Keimen.

Aktiv

Der Zusatz von Thymol desinfiziert das Material selbst und die umliegenden Bereiche und verhindert die Anlagerung von Biofilm. flow.sil ist biologisch verträglich auf pflanzlicher Basis.

flow.sil ist ideal für die desinfizierende Verblockung der Zwischenräume von Abutment und prothetischer Versorgung oder Verschraubung

- Reduziert Periimplantitis
- Reduziert Halitosis
- Verhindert Entzündungsherde im Einsatzbereich
- Verhindert Verschmutzungen in den Hohlbereichen
- Dichtet sauber ab

flow.sil – Komfortable Handhabung

- Lässt sich auch in schwer zugängliche Bereiche einfach applizieren
- Härtet schnell aus, so dass der Patient sehr kurze Wartezeiten hat
- Die Überschussentfernung ist komfortabel ohne Skalpell möglich



flow.sil in die gereinigte Kroneninnenseite und den Schraubenkanal applizieren



Konstruktion auf die Abutments setzen. Überschüssiges Material wird gleichmäßig ausgedrückt



flow.sil hat eine Verarbeitungsbreite von 4 Minuten und ermöglicht ein stressfreies Verarbeiten. Die Schrauben eindrehen und Überschuss aushärten lassen.



Tritt der Überschuss gleichmäßig aus, ist die Abdichtung unerwünschter Zwischenräume erfolgreich.



Das ausgehärtete flow.sil kann einfach mit einem Instrument entfernt werden. flow.sil reißt exakt an der Übergangskante ab und verhindert das Eindringen von Bakterien.



flow.sil
REF 540 0127 0
Sortiment mit
5 ml Doppelkartusche,
4 Mischkanülen,
4 Tips

